

# Kapillarblut-Abnahmeset zur Verwendung mit dem Orient Gene HCV Test

REF 0270155A

## VERWENDUNGSZWECK

Das Kapillarblut Abnahmeset zum Orient Gene HCV Test ist für Abnahme von humanen Kapillarblutproben zur Verwendung mit dem Orient Gene HCV Hepatitis C Virus Schnelltest, Ref.: CCHCV-402a (möLab Artikel-Nr. 0270155), bestimmt.

## PACKUNGSMENGE

25 Einweglanzetten (23G, Einstichtiefe: 1,8 mm)  
25 Alkoholpads  
25 Pipetten mit 60 µl Markierung  
1 Gebrauchsanweisung

## ZUSÄTZLICH BENÖTIGTES MATERIAL

Pflaster

## PRODUKTBESTANDTEILE

Einweglanzette: Feder, Schutzkappe, Auslöser, rückseitige Kappe, Nadel, Nadelverbinder und Hülse  
Alkoholpads: Pad getränkt mit 70 % Isopropylalkohol

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN LANZETTE

1. Erscheinungsbild: Die Oberfläche des Nadelkörpers ist glatt und frei von Fremdkörpern. Die Nadelspitze ist scharf und weist keine Grate oder Haken auf.
2. Rückzugsfunktion: Die Nadelspitze zieht sich nach der Aktivierung zurück.
3. Sterilität: Durch Bestrahlung sterilisiert.

## LAGERUNG UND TRANSPORT

Die Packung kann bei Raumtemperatur an einen trockenen, belüfteten Platz gelagert werden. Nicht mit toxischen Materialien oder Gefahrgut versenden. Während des Transports vor Sonne, Regen und Schnee schützen.

## WARNHINWEISE UND VERHALTENSMASSREGELN

1. Verwenden Sie die Lanzette nicht, wenn die Schutzkappe abgefallen oder die Hülle beschädigt ist.
2. Alle Materialien sind ausschließlich für die Einmalverwendung bestimmt. NICHT wiederverwenden.
3. Achten Sie während der Verwendung auf die Sicherheit. Verletzen Sie weder sich noch andere unnötig.
4. Verwenden Sie Materialien nicht mehr nach Ablauf des Verfallsdatums.

## PROBENNAHME

1. Überprüfen Sie die Materialien.  
Verwenden Sie Lanzette nicht, falls Sie beschädigt.  
Verwenden Sie das Alkoholpad nicht, wenn die Folienverpackung eingerissen oder bereits geöffnet ist.
2. Desinfizieren Sie die Einstichstelle mit dem Alkoholpad. Berühren Sie die desinfizierte Stelle nicht mehr.
3. Massieren Sie die Hand in Richtung der Fingerspitze des Mittel- oder Ringfingers, ohne die Einstichstelle zu berühren.
4. Drehen Sie die Schutzkappe von der Lanzette.
5. Drücken Sie die Lanzette leicht auf die zu punktierende Stelle.
6. Wischen Sie den ersten Tropfen Blut ab.
7. Massieren Sie die Hand sanft vom Handgelenk über die Handfläche bis zum Finger, um einen runden Blutropfen über der Punktionsstelle zu erhalten.
8. Füllen Sie die Mikropipette bis zur Markierung (ca. 60 µl) mit Blut. Vermeiden Sie Luftblasen.
9. Geben Sie das Blut in den Probenschacht (S) der Testkassette.

10. Entsorgen Sie die verwendeten Materialien als potentiell infektiösen Abfall.  
HINWEIS: Beachten Sie zur Probenahme auch das entsprechende Kapitel in der Gebrauchsanweisung des Orient Gene HCV Tests.

## KONTRAINDIKATIONEN

Keine








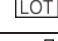
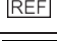

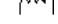
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
## WARNHINWEISE

Keine

## HERSTELLUNGSDATUM / VERFALLSDATUM / CHARGEN-NR.


Siehe Produktverpackung

## SYMBOLERLÄUTERUNGEN

	Gebrauchsanleitung beachten		Tests pro Packung		Authorisierter Repräsentant
	In-vitro Diagnostikum		Verwendbar bis		Zur Einmalverwendung
	Lagerung bei 2-30°C		Lot/Charge Nummer		Bestell #
	Hersteller		Herstellungsdatum		Sterilisiert durch Bestrahlung

## HERSTELLER


Lanzetten:

 Hebei Xinle Sci. & Tech Co. Ltd.  
No.189, Nanhuan Road, Xinle City,  
050700, Hebei Province, VR China



Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)  
Eiffelstrasse 80, 20537 Hamburg  
Tel.: +49 40 2513175 / Fax: +49 40 255726  
E-Mail: shholding@hotmail.com

Alkoholpad:

 Huaian Longxin Non-woven Products Co., Ltd.  
Qianjiang Road South Side (Room 101, Building 22, A District),  
Shenyang Road West Side, Huaiyin Industrial Park,  
Huaian City, 223001, VR China



Vertrieb durch:

**Porod Medizintechnik GmbH**  
Hornerstraße 24  
3580 - Frauenhofen  
(Austria) Österreich

+43 2982 2928  
info@porod-med.com  
https://www.porod-med.com

Artikel-Nr.: 0270155

XL-CE-JS-C/2-04-08  
Revision Datum: 2021-03-29