

Anleitung zur Probennahme

Zecken-Test

Ist Ihr Test-Paket vollständig?

Bitte überprüfen Sie zunächst, ob Ihr Test-Paket vollständig ist.
Es sollte enthalten:


- 1 Anleitung zur Probennahme
- 1 Anleitung zur Befundabfrage
- 1 Probenbegleitschein
- 1 Garantieschein
- Zeckenentfernen-Komplettset
- 1 Etikett mit der Aufschrift „ZECKE Datum, Name“
- 1 blaue Versandtasche

Test-Vorbereitung

Wird eine Zecke am Körper entdeckt, sollte sie so schnell wie möglich entfernt werden, um das Übertragungsrisiko zu verringern. **Alte Hausmittel wie Klebstoff oder Öl dürfen auf keinen Fall angewandt werden, um die Zecke zu töten!** In ihrem Todeskampf injizieren die Zecken verstärkt Erreger in die Stichwunde. Auch Quetschen des Zeckenkörpers ist unbedingt zu vermeiden, da dadurch die möglicherweise vorhandenen Krankheitserreger in den Körper injiziert werden. Aus diesem Grund ist auch dringend von einer Zeckenzange abzuraten.

Test-Durchführung

1. Brechen Sie den Zeckenentferner aus der Karte und schieben Sie ihn vollständig unter den Körper der Zecke. Mit der Lupe kann der Vorgang überprüft werden. Heben Sie den Zeckenentferner an, um die Zecke zu entfernen.
2. Geben Sie die Zecke in das Transportgefäß.
3. Verschließen Sie das Transportgefäß mit dem Lupendeckel. Beschriften Sie das Etikett mit **Patientenname** und **Probennahme-Datum**. Kleben Sie dieses auf das Transportgefäß.
4. Legen Sie bitte das Transportgefäß mit der Zecke und mit dem ausgefüllten Probenbegleitschein in die blaue Versandtasche und senden diese kostenfrei an unser Labor zurück

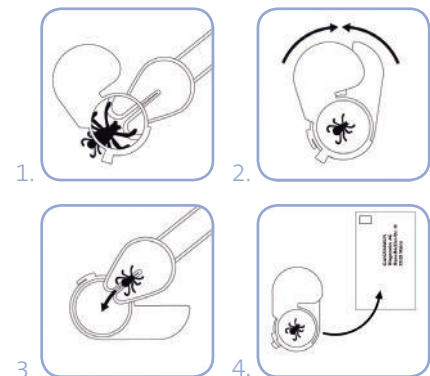

Vielen Dank für Ihre Mithilfe!
Ihr medivere-Team